




C-ITRONE

# C-ITRONE 200 / 600

## SCHRÖPFTHERAPIE IM VETERINÄRBEREICH UND IN DER ALTERNATIVEN MEDIZIN

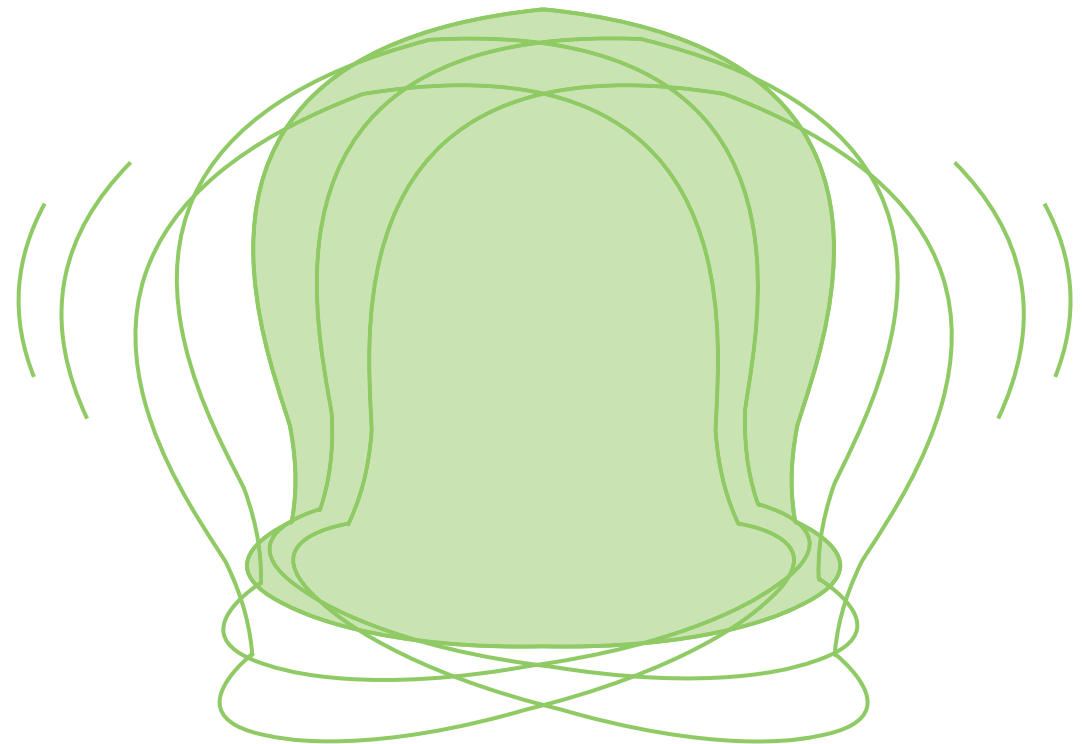

\\ WIR HABEN ES UNS ZUR AUFGABE GEMACHT, DEN PFERDEN ZU PHYSISCHEM WOHLBEFINDEN UND GRÖSSTMÖGLICHER LEISTUNGSFÄHIGKEIT ZU VERHELFFEN.\\



# WARUM EINE SCHRÖPFTHERAPIE ANWENDEN?




Das Schröpfen ist eines der ältesten weltweit praktizierten Therapieverfahren und ist vor allem in der traditionellen chinesischen Medizin auch heute noch beliebt. Die Wirkung ist ganzheitlich: Anregung der Durchblutung, Lösung von Verspannungen und Verringerung von Schmerzen. Hierdurch können sogar Organe zur Selbstheilung angeregt werden. Beim Schröpfen gibt es verschiedenen Techniken.

Für das Schröpfen am Pferd hat Christian Danner mit namhaften Partnern ein neuartiges Gerät entwickelt, das die Luft mit individuell anpassbarer Stärke aus den aufgesetzten Schröpfgläsern saugt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Hierdurch werden vielfältige Reaktionen ausgelöst: stärkere Durchblutung des Gewebes, Anregung des Lymphflusses und Stärkung des Immunsystems, sowie der Abbau von Ver-

spannungen und Verhärtungen. Durch die Aktivierung bestimmter Reflexzonen am Pferderücken und deren Verbindungen zu den Nervenbahnen kann eine positive Wirkung auf die Heilung von inneren Organen erzielt werden.

Ziel des Schröpfens ist es, die Selbstheilungskräfte des Organismus zu stärken und in Gang zu bringen, das Immunsystem zu aktivieren und einen Entgiftungsprozess anzuregen. Außerdem werden die Reflexzonen am Rücken des Pferdes aktiviert, die durch Nerven in direkter Verbindung zu den inneren Organen stehen. Bei Schmerzen wird durch das Saugen der Schröpfgläser ein Gegenreiz erzeugt, der einen „neuen Schmerz“ erzeugt. Daraus ergibt sich für die Körperstellen, die akut schmerzen, eine Entlastungswirkung, wodurch der ursprüngliche Schmerz gestillt wird.

//BEREITS DIE ERSTEN BEHANDLUNGEN HABEN  
UNS DARIN BESTÄRKT, WIE WIRKUNGSVOLL DIE  
SCHRÖPFTHERAPIE BEI PFERDEN IST.//

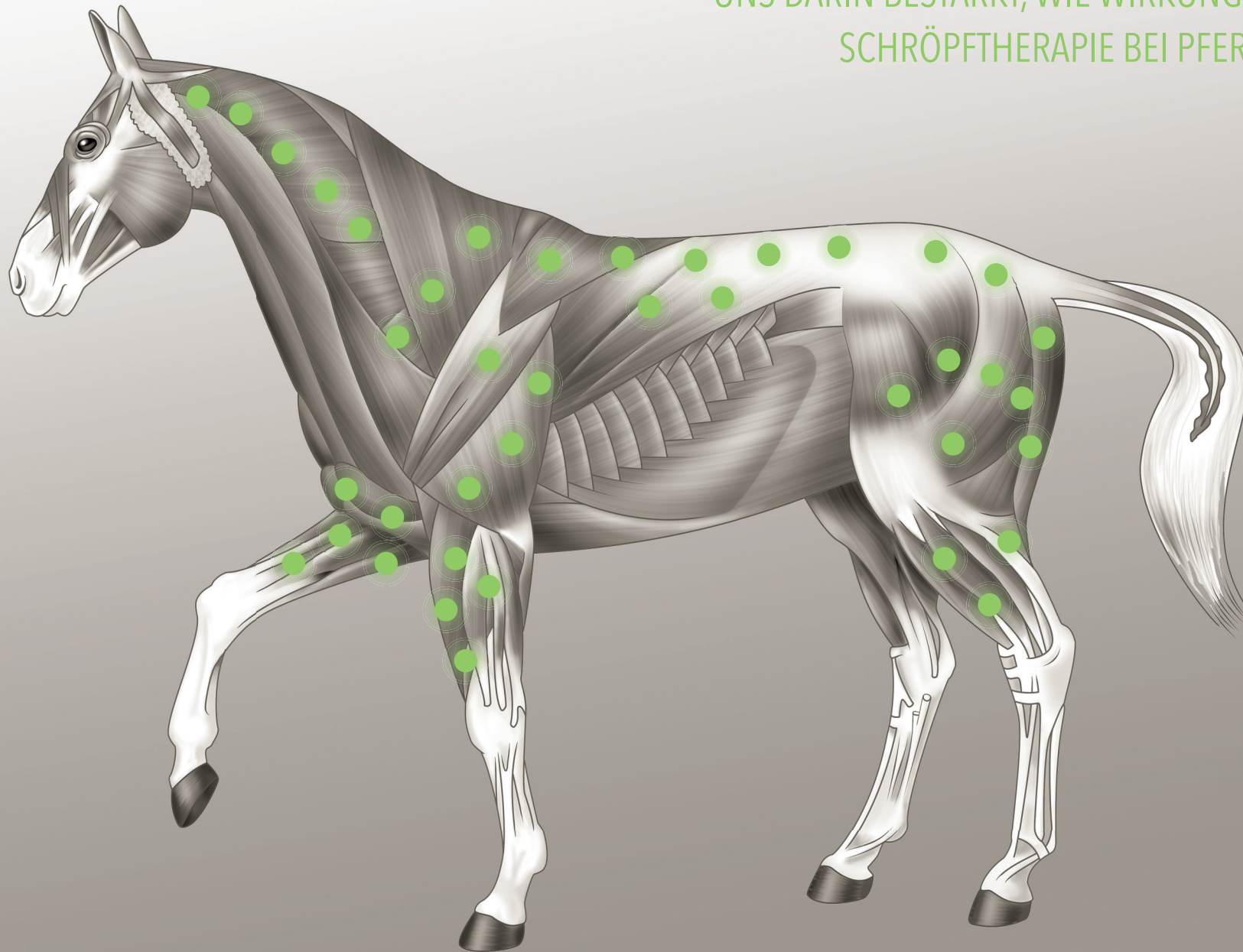

# WO SITZEN DIE NEURALGISCHEN PUNKTE BEIM PFERD?



Die links abgebildete Grafik zeigt die wichtigsten Stimulanzpunkte am Pferd. Diese sind auf beiden Seiten des Tieres identisch. Es können zur umfangreichen Behandlung auch mehrere Gläser gleichzeitig angesetzt werden. Die bedeutendsten Zonen liegen am vorderen und hinteren Rücken sowie am Schulter- und Lendenbereich. Darüber hinaus sind noch folgende Aspekte wissenswert:

## HEAD'SCHE ZONEN

Die Head'schen Zonen befinden sich am ganzen Körper an den Dermatomen – dies sind Hautsegmente, die sich quer entlang der Wirbel in auslaufenden Bahnen erstrecken. Head'sche Zonen weisen eine reflektorische Verbindung zu einigen inneren Organen auf. Dies bedeutet, dass sich Beschwerden oder Schmerzen an inneren Organen an den entsprechenden Hautarealen oder Head'schen Zonen zeigen können. Hierbei wird von „übertragenem Schmerz“ gesprochen. Die Stimulation dieser Areale kann entsprechend auch die Organe beeinflussen.

## HALS UND SCHULTER

Die Stimulation spezifischer anatomischer Punkte führt zur Freisetzung von Endorphinen in den Blutkreislauf und zu einer Entspannung von Muskelspasmen. Der entspannte Muskel wird stärker durchblutet, so dass seine Nährstoffversorgung und der Abtransport von Stoffwechselprodukten gesteigert werden.

## GLIEDMASSEN

Das Behandeln der Gliedmaßen bewirkt eine Steigerung der Durchblutung, Erhöhung des Sauerstoffgehaltes im Blut und die Verminderung von Kohlendioxidansammlungen im Gewebe. Dadurch werden Nährstoffe schneller zum geschädigten Gewebe transportiert und Stoffwechselschlacken schneller entfernt. Außerdem richten sich neugebildete Fasern aus, die Empfindlichkeit schmerzleitender Nerven nimmt vorübergehend ab.

## RÜCKEN

Das Schröpfen erfolgt hauptsächlich am Rücken. Hier liegen die Reflexzonen, die mit einzelnen inneren Organen in Verbindung stehen. Symptome, die auf eine Fehlfunktion der betroffenen Stelle hinweisen, sind Verhärtungen der Muskulatur, Erhebungen oder leichte Eindellungen. Durch das gezielte Schröpfen werden die entsprechenden Organe unmittelbar positiv beeinflusst und aktiviert. Verhärtungen werden wirksam gelindert und verbessert.

## MYOPATHIE

Eingesetzt werden kann die Schröpftherapie auch bei belastungsbedingten Myopathien, also Muskelerkrankungen. Diese manifestieren sich anfangs als Steifheit und Verkrampfung im Hals-, Rücken- und Kruppenbereich. Eine gezielte Behandlung dieser Areale kann die Beschwerden dauerhaft lindern.

## BEHANDLUNGSEMPFEHLUNG

Allgemein beträgt die Schröpfzeit pro Körperzone zwischen 5 bis 10 Sekunden bei durchschnittlich 0,2 bis 0,3 bar Druckeinstellung. Bei niedrigeren Druckeinstellungen kann auch bis zu 20 Sekunden an einer Stelle angesetzt werden. Im Beckenbereich können auch bis zu 0,7 bar eingestellt werden. Generell gilt, dass maximal 0,9 bar nicht überschritten werden dürfen.

Pro Seite eines Pferdes werden 10-15 Minuten Behandlungszeit veranschlagt. Maximal sollte eine Behandlung nicht länger als 20-25 Minuten dauern.



# MÖGLICHE WIRKUNGEN



## INDIKATIONEN

Mögliche Behandlungsgebiete sind:

- Schmerzen im Allgemeinen, v.a. auf der Basis Qi- und Blutstagnation (Verspannungen, Luxationen, Verstauchungen, Bandscheibenprolaps, Rückenbeschwerden, Lumbago, etc.)
- Anzeichen für Blutstase: Dolor, Rubor, Calor, Tumor
- Kältezeichen, wie Krämpfe oder kalte Blutstase
- Hitzezeichen, wie Fieber, Toxische Hitze
- Rheuma, Arthritis (Bi-Syndrom: Wind und andere Beschwerden)
- Verdauungsbeschwerden: Meteorismus, Tenesmen
- Infekte
- Erkrankungen des oberen Respirationstraktes



## KONTRAINDIKATIONEN

In diesen Fällen darf eine Schröpftherapie nicht eingesetzt werden:

- In der Nähe großer Blutgefäße
- Blutungsneigung, Blutgerinnungsstörungen, Hämophilie (blutiges Schröpfen)
- Ausgeprägte Anämien, Flüssigkeitsdefizit (blutiges Schröpfen)
- Ödeme
- Trächtigkeit
- An Narbengewebe darf nicht geschröpft werden
- Melanome, Hauterhebungen jeglicher Art
- Warzen, Hautausschläge (Ekzeme...)
- Auf Verletzungen
- Akute Entzündungen
- Bei Fohlen und älteren oder schwächeren Pferden (kein blutiges Schröpfen)



## RESTRISIKEN

Wird das Gerät nicht fachgerecht angewendet, kann es zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen:

- Kreislaufstörungen
- Brandblasen
- Hautreaktionen

Es sollte auf eine angemessene Dauer der Behandlungssitzung geachtet werden. So liegt die maximale Anwendungsdauer beim Pferd bei ca. 20-25 Minuten.

„Schröpfen ist nicht zur Selbstbehandlung gedacht, sondern gehört in die Hände eines zertifizierten Heilpraktikers.“



## POSITIVE WIRKUNG

- Lösung von Muskelverspannungen und -verhärtungen
- Steigerung der Durchblutung
- Verringerung von Schmerzen
- Verbesserung des Lymphflusses, Entschlackung
- Erhöhung der Sauerstoffversorgung von Haut, Unterhaut und Bindegewebe
- Aktivierung der Stoffwechselleistung der Zellen
- Stärkung des Immunsystems
- Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Organismus
- Aktivierung der Reflexzonen (Head'sche Zonen) zur Stimulierung innerer Organe
- Harmonisierung des Nervensystems
- Förderung des Abtransports von Giftstoffen über den Lymphfluss



//DER PFERDERÜCKEN IST EIN KOMPLEXER, SEHR EMPFINDLICHER  
BEREICH DES KÖRPERS BEI DEM VIELE BEREICHE – BEDINGT  
DURCH UNTERSCHIEDLICHE FAKTOREN – SCHMERZEN VERURSACHEN KÖNNEN.//



# ANWENDUNG DES GERÄTES AM TIER



## HALSPARTIE BEIM PFERD

An den sensiblen Halspartien kann bequem mit den Schröpfgläsern H3 und H2 mit mittelgroßem Durchmesser angesetzt werden.



## ANZETZEN VON H3

Nach kurzem Ansaugen verbleibt das Glas ca. 5 bis 10 Sekunden an der verhärteten Stelle, eine Verbesserung des Lymphflusses setzt ein; das Gewebe wird entschlackt.



## RÜCKEN IM LENDENBEREICH

Viele der speziell in den hinteren Rückenpartien auftretenden Beschwerden können durch mehrmalige Schröpfbehandlungen erheblich reduziert werden.



## EMPFEHLUNG VON H2

Speziell für den flächigen Lendenbereich eignet sich die H2-Glaskugel mit einem mittelgroßen Durchmesser und der stärksten Saugwirkung; auch H1-Glaskugel ist möglich.



## RÜCKEN IM BRUSTBEREICH

Gerade hier im Rücken-, Lenden- und Beckenbereich, finden sich viele der Head'schen Zonen, die zur Stimulierung und Selbstheilung der inneren Organe beitragen.



## ANWENDUNG VON H1

Bei den sensiblen, aber großflächigen vorderen Rückenpartien, eignet sich die H1-Glaskugel mit dem größten Durchmesser um eine optimale Wirkung zu erzielen.



## GLIEDMASSEN

Bei den empfindlichen Beinpartien, Vorderwie auch Hintergliedmaßen, sind nur kurze Schröpfzeiten zwischen 5 und 10 Sekunden, bei geringem Druck zu empfehlen.



## ANLEGEN VON H4

Die seitlich angebrachten Noppen an den kleinen Schröpfgläsern erleichtern die Handhabung, sowie das passgenaue Ansetzen des jeweiligen Glases.

# AUFBAU UND FUNKTION DES C 200



## VOR INBETRIEBNAHME

Der C 200 verfügt über eine kompakte Größe von 40 x 50 x 26 cm. Mit Hilfe der Gummierollen kann das 10 kg leichte Gerät überall schnell positioniert und unkompliziert aufgebaut werden.



## GERÄT IM AUFBAU

Der Deckel wird nach beiden Seiten aufgeklappt. Im Inneren befindet sich der 3 m lange Schlauch sowie das Kabel für den Stromanschluss, sowie die Bedieneinheit.



## BASIS-SET: SCHRÖPFGLÄSER

Zur Grundausrüstung für Pferde H1, H2 und H3 zur Behandlung von Hals, Rücken und Becken werden noch drei Gläser D1, D2 und D3 für die Behandlung von Hunden mitgeliefert.



## AUFBEWAHRUNG DER GLÄSER

In einem weiteren Koffer ist das Basis-Set der Schröpfgläser, bestehend aus H1, H2, H3 und D1, D2 und D3, untergebracht. Die Gläser liegen geschützt in stabilem Schaumstoff.



## ERWEITERUNGS-SET: GLIEDMASSEN

Daneben gibt es noch ein weiteres Schröpfset mit drei kleineren Gläsern, das zusätzlich zur Behandlung der vorderen und hinteren Gliedmaßen beim Pferd erworben werden kann.



## ANSCHLUSS LUFTSCHLAUCH

Der Vakuum-Stecker wird durch ein simples Klick-System mit dem Gerät verbunden. So sitzt der Stecker richtig fest und das Gerät ist einsatzbereit.



## SCHNELLER SCHRAUBVERSCHLUSS

Das Glas wird durch einen einfach zu bedienend Schraubverschluss am Schlauch befestigt. Alle Gläser können so mit dem gleichen Verschluss befestigt werden.



## SOFORTIGE INBETRIEBNAHME

Das Ein- und Ausschalten der Anlage erfolgt durch den grünen Knopf, der blaue Knopf aktiviert die Vakuumfunktion. Alle weiteren Parameter können über die Verteilerbox eingestellt werden.

# AUFBAU UND FUNKTION DES C 600



## VOR INBETRIEBNAHME

Auch der C 600 (50 x 30 x 40 cm, 21 kg) zeichnet sich durch seine Handlichkeit aus. Durch den zweifach verstellbaren Griff und der Gummirollen kann auch dieses Gerät schnell aufgebaut werden.



## GERÄT IM AUFBAU

Nach Aufklappen des Deckels finden sich im Bauteil ein Tablet, manuelle Bedienelemente, der 3 m lange Schlauch sowie das Kabel für den Stromanschluss.



## AUFBEWAHRUNG DER GLÄSER

Die Standardauslieferung erfolgt mit dem Koffer siehe C 200, Seite 10. Der C 600 kann allerdings mit einem Kofferaufbau für die Gläser erweitert werden (ist im Basispreis nicht enthalten).



## BASIS-SET: SCHRÖPFGLÄSER

Ob Standard- oder Aufbaukoffer, das Basis-Gläserset besteht aus den Gläsern für Pferde H1, H2 und H3 zur Behandlung von Hals, Rücken und Becken und für Hunde D1, D2 und D3.



## ERWEITERUNGS-SET: GLIEDMASSEN

Daneben gibt es auch hier noch ein weiteres Schröpfset mit drei kleineren Gläsern, das zusätzlich zur Behandlung der vorderen und hinteren Gliedmaßen erworben werden kann.




## ANSCHLUSS LUFTSCHLAUCH

Der Vakuum-Stecker wird durch ein simples Klick-System mit dem Gerät verbunden. Nach dem Anschluss sitzt der Stecker richtig fest und das Gerät ist einsatzbereit.



## SCHNELLER SCHRAUBVERSCHLUSS

Das Glas wird durch einen einfach zu bedienenden Schraubverschluss am Schlauch befestigt. Alle Gläser können so mit dem gleichen Verschluss befestigt werden.

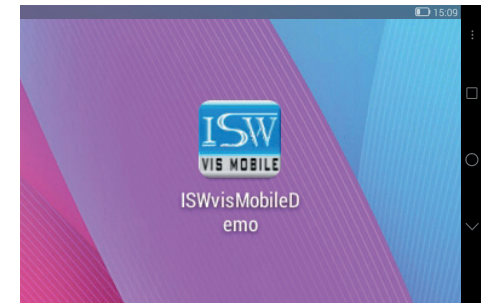

## SOFORTIGE INBETRIEBNAHME

Ist das Gerät am Netz angeschlossen, so startet die Anlage. Tablet anschalten und die Software starten, die App öffnet und verbindet sich innerhalb von 30 Sekunden. Der C 600 ist einsatzbereit.



C-ITRONE



## C-ITRONE 200 / 600

### SCHRÖPFTHERAPIE IM VETERINÄRBEREICH UND IN DER ALTERNATIVEN MEDIZIN

C-ITRONE UG (Haftungsbeschränkt)  
Ganghoferstraße 1  
86825 Bad Wörishofen

Website: [www.c-itrone.com](http://www.c-itrone.com)  
E-Mail: [info@c-itrone.com](mailto:info@c-itrone.com)  
[www.facebook.com/Schroepftherapie](https://www.facebook.com/Schroepftherapie)  
Vetbereich.Alternativmedizin

Mit freundlicher Empfehlung